



Anleitung - Antigen-Selbsttests zur Eigenanwendung

Um den digitalen Selbsttest durchführen zu können, ist eine Internetanbindung und ein Gerät mit Kamera erforderlich, mit der Fotos vom Testergebnis inklusive QR-Code zu machen sind. Die Bestätigung des negativen Selbsttests wird Ihnen anschließend vom Test-Portal per E-Mail oder SMS übermittelt. Diese ist für 24-Stunden als Eintrittstest (etwa in der Gastronomie) anerkannt (Stand: Mai 2021)

WICHTIG: Dieser Nachweis gilt nicht für Grenzübertritte! Dieser ist laut Bund nur über die offiziellen Teststraßen des Landes einzuholen! Anmeldung erfolgt unter [tiroltestet.at](https://www.tiroltestet.at) oder unter Tel. 1450!

ABLAUF

Registrierung auf selbsttest.tirol

Bestätigung der Anmeldung:

Folgen Sie dem Link, den Sie erhalten haben, um das Selbsttestverfahren fortzusetzen. Zur Identitätsfeststellung geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.

Test durchführen:

Führen Sie den Selbsttest laut Gebrauchsanweisung durch (siehe Rückseite). Stellen Sie sicher dass das Ergebnis klar sichtbar ist. Das kann bis zu 15 Minuten dauern.

Test fotografieren:

Kleben Sie einen beigefügten QR-Code auf die Vorderseite des Selbsttests. Das Testergebnis mit dem QR-Code Aufkleber muss fotografiert und hochgeladen werden.

Test entwerthen:


Bitte entwerthen Sie Ihren Covid-19 Selbsttest, indem Sie den Test im Ergebnisfeld übermalen oder schwärzen. Danach muss erneut ein Foto vom entwerteten Selbsttest aufgenommen und hochgeladen werden. Die QR-Codes auf den beiden Fotos werden vom System abgeglichen und müssen übereinstimmen.

Bei negativem Ergebnis:

Testergebnis übernehmen: Ihr Testbefund ist fertig. Sie erhalten in Kürze einen Link per Mail oder SMS zugesendet. Mit diesem Link können Sie Ihren persönlichen Befund jederzeit abrufen. Der Testbefund ist für 24 Stunden als Eintrittsnachweis gültig.

6 Schritte-Anleitung zum Antigen-Selbsttest

Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test

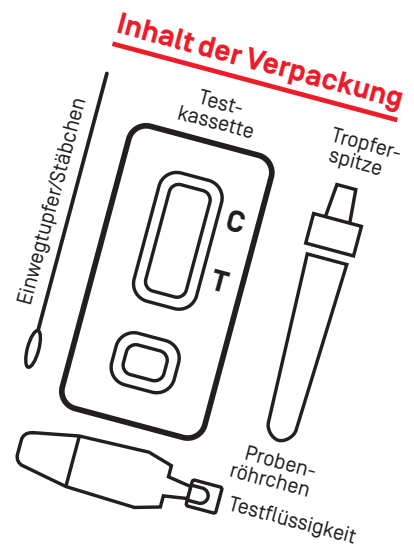

1. **5x** **1.**

Tupfer **ca. 2,5 cm** in ein Nasenloch einführen
Das Stäbchen **5 Mal drehen**, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

Deckel einer Testflüssigkeit abschrauben
Gesamte Flüssigkeit in das Probenröhrchen einfüllen
Das Stäbchen einführen und Tupfer **5x drehen**
Tupfer **1 Minute** im Probenröhrchen lassen

2. **2.**

5x **1 Min.**

3. **3.**

Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
Tropferspitze aufsetzen

Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
3 Tropfen aus dem Röhrchen auf die Testkassette tropfen

4. **4.**

1 2 3

Wichtig: Die Testkassette reagiert nach dem Auftropfen der Testflüssigkeit sensibel auf Bewegung. Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, darf sie daher nicht gedreht, geschüttelt oder bspw. von einem Raum in den anderen getragen werden.

5. **5.**

15 Min.
15 Minuten warten
Das Ergebnis ablesen

Ergebnisinterpretation

6. **6.**

negativ
positiv
ungültig

POSITIV? → 1450 anrufen!

NEGATIV? Weiterhin gesund bleiben!

Disclaimer: Diese Anleitung dient einer übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellung der Testabläufe bei einer Eigenanwendung von anterio-nasalen COVID-19-Antigen-Schnelltests. Bitte beachten Sie, dass die Durchführung von COVID-19-Antigen-Schnelltests immer entsprechend der Gebrauchsinformation des jeweiligen Herstellers oder Inverkehrbringers zu erfolgen hat. Lesen Sie daher bitte vor Verwendung eines COVID-19-Antigen-Schnelltests die beiliegende Gebrauchsinformation genau durch und befolgen Sie die darin vorgegebene Anleitung! Die Österreichische Apothekerkammer übernimmt keine Haftung für Schäden jedweder Art, die durch die Verwendung der Inhalte dieser Anleitung entstehen können.

